

URGOSTRAPPING



Bande élastique adhésive de contention de haute tolérance cutanée

Urgostrapping

Bande adhésive sur papier protecteur siliconé, déchirable à la main. Longueur non étirée : 2,5 mètres. Coloris : blanc.

CODE	DIMENSIONS Bande sous film imprimé	GROUPAGE Nombre UCD
501843	2,5 m x 3 cm	80
501844	2,5 m x 6 cm	40
501845	2,5 m x 8 cm	80
501847	2,5 m x 10 cm	80
501848	2,5 m x 15 cm	40
501849	2,5 m x 20 cm	40

Lire attentivement la notice

URGOSTRAPPING



DESCRIPTION

- Bande élastique tissée enduite d'une masse adhésive composée d'élastomères et de résine de synthèse, sans solvant.
- Enduction et aération sur toute la surface.
- Présentation :
 - sur protecteur papier siliconé,
 - sur axe,
 - sous film imprimé.
- Chaîne : 100 % coton.
- Trame : 85 % coton
15 % viscose

PROPRIETES

- Elasticité assurée par la surtorsion des fils de coton.
- Extensibilité en longueur $\geq 40\%$.
- Les lisières non tissées garantissent l'absence de risque de striction.
- Les échanges physiologiques de la peau, perspiration transpiration sont favorisés par :
 - la présence des fibres de coton,
 - l'aération de la masse adhésive sur toute la surface de la bande.
- La manipulation est facilitée par :
 - le protecteur papier déchirable à la main.
- La masse adhésive est spécialement conçue pour résister à de fortes transpirations.
- Masse adhésive de haute tolérance cutanée (sauf allergie propre à un des composants de la bande). En cas d'usage statique prolongé ou de pose sur une partie sensible du corps, une interface est nécessaire entre la peau et la bande.
- Usage unique.
- Radiotransparence.

INDICATIONS

- TRAUMATOLOGIE - Contention dans la prévention et le traitement des lésions traumatiques articulaires, musculo-tendineuses et ligamentaires.
- Rééducation fonctionnelle pour une reprise graduelle de l'activité.
- SOIN - Fixation de pansements.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Utiliser sur une peau sèche, saine et dégraissée.
- Couper la longueur de bande désirée et décoller le papier protecteur à une extrémité, le déchirer à la main au fur et à mesure de la pose.
- Construire la contention en appliquant une tension plus ou moins importante à la bande en fonction de l'effet recherché.
- Consolider la contention par le recouvrement de chaque bande à une ou deux reprises, en respectant le recouvrement d'au moins la moitié de la première bande.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne jamais poser la bande directement sur une peau lésée.
- Éviter des tensions excessives en maintien de pansements.
- Ne jamais poser sous forte tension en circulaire.
- En cas d'usage statique prolongé ou de pose sur une partie sensible du corps, une interface est nécessaire entre la peau et la bande.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe I.
Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).