

# UrgoTul Ag



Inscription à marque  
ASR IV\*



## Interface lipido-colloïde non adhésive imprégnée de Sels d'Argent

### Urgotul Ag

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
			Nombre UCD/Boîte	Nombre UCD
507633	Standard : 10 x 12 cm	16	256	16
507627	Grand : 15 x 20 cm	16	224	14

Lire attentivement la notice

# UrgoTul Ag



## DESCRIPTION

- Interface lipido-colloïde non adhésive imprégnée de Sels d'Argent.

**COMPOSITION :** Urgotul Ag est un pansement interface imprégné de Sel d'Argent issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.

**Urgotul Ag** est un pansement non adhésif, non occlusif, non adhérent à la plaie, composé d'une trame en polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose), de vaseline et de sel d'argent.

**PRESENTATION :** Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

**MODE DE STERILISATION :** Radiostérilité.

## PROPRIETES

- La spécificité de la TLC d'**Urgotul Ag** réside dans la présence d'une matrice polymérique qui assure la cohésion des particules hydrocolloïdes et de la vaseline sur une trame polyester. Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment un film lipido-colloïdal de contact avec la plaie.
- Les sels d'Argent d'**Urgotul Ag** libèrent progressivement les ions Argent au contact des exsudats pour une activité anti-bactérienne de contact capable de diminuer la charge bactérienne locale des plaies présentant des signes inflammatoires locaux évocateurs d'un risque d'infection locale. L'ion Argent présente un large spectre d'action anti-microbien incluant les bactéries Gram négatif, Gram positif et certaines moisissures et levures. Il est particulièrement efficace sur les germes les plus souvent responsables de l'infection des plaies : Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus Méti-R, Pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique).
- **Urgotul Ag** a démontré une activité anti-bactérienne in vitro jusqu'à 7 jours.
- L'activité anti-bactérienne d'**Urgotul Ag** permet en outre une réduction de l'odeur causée par certains micro-organismes présents dans la plaie.
- Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, l'interface d'**Urgotul Ag** n'adhère pas à la plaie : les renouvellements de pansements sont donc indolores pour le patient et atraumatiques pour la plaie.
- Souple et très confortable, **Urgotul Ag** épouse les reliefs anatomiques de la plaie.

## INDICATIONS

- **Urgotul Ag** est indiqué dans le traitement local des plaies présentant un risque d'infection : plaies chroniques (ulcères, escarres), plaies aiguës (brûlures du 2e degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies chirurgicales, etc...). En raison de son caractère non adhésif, **Urgotul Ag** est recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lésionnelle fragilisée.

## CONSEILS D'UTILISATION

### MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application d'**Urgotul Ag**.
- Retirer les ailettes de protection d'**Urgotul Ag**.
- Appliquer **Urgotul Ag** directement sur la plaie.
- Recouvrir **Urgotul Ag** d'un pansement secondaire : compresses stériles maintenues par une bande extensible ou un sparadrap multi-extensible ou filet tubulaire.
- Les renouvellements d'**Urgotul Ag** seront effectués tous les 1 à 3 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution clinique.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Le traitement par **Urgotul Ag** se fera exclusivement sous surveillance médicale.
- **Urgotul Ag** peut adhérer aux gants chirurgicaux (latex). Aussi, est-il recommandé d'humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter, dans ce cas, la manipulation d'**Urgotul Ag**.
- L'utilisation conjointe avec d'autres traitements est déconseillée.
- Les professionnels de santé doivent prendre en compte que les données concernant l'utilisation prolongée et répétée d'un pansement à l'argent, particulièrement chez l'enfant et le nouveau-né sont peu documentées.
- En l'absence de données cliniques spécifiques, l'utilisation d'**Urgotul Ag** pendant la grossesse et l'allaitement ainsi que sur le nouveau-né et le prématuré est déconseillée.
- Éviter le contact du pansement avec les électrodes ou gels conducteurs pendant les mesures effectuées à l'aide d'appareils électroniques (EEG, ECG, etc...).
- Ne pas restériliser le pansement.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Stocker **Urgotul Ag** à l'abri de la chaleur et de la lumière, à une température inférieure à 25°C.

### CONTRE-INDICATIONS :

- Sensibilisation connue à l'argent et autres composants du pansement.
- Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d'examen par Résonance Magnétique Nucléaire (IRM).

## STATUT REGLEMENTAIRE


Dispositif médical marqué CE Classe III (BSI).

Intégralement remboursable (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %). \*Avis HAS : ASA IV dans le traitement séquentiel de quatre semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire, ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux changements de pansement, érythème péri-lésionnel, oedème, plaie malodorante, exsudat abondant.

Avis consultable sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)

# UrgoTul Ag

## Lite Border

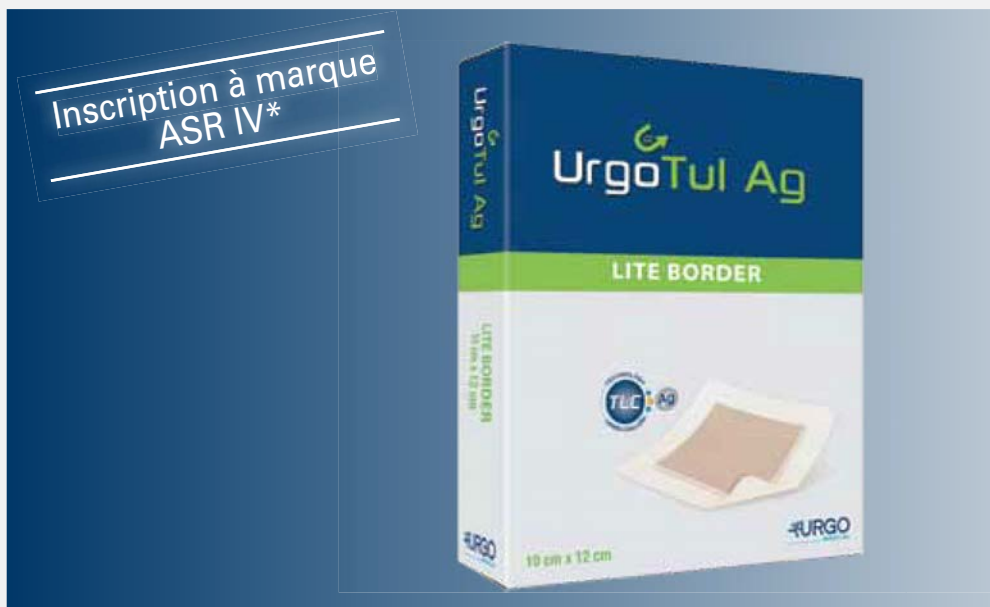

**Interface lipido-colloïde adhésive et légèrement absorbante, imprégnée de Sels d'Argent**

### Urgotul Ag Lite Border

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	DIMENSIONS <i>compresse</i>	PRÉSENTATION		GROUPAGE <i>Nombre boîtes</i>
			<i>Nombre UCD/Boîte</i>	<i>Nombre UCD</i>	
507560	Petit : 8 x 8 cm	4,5 x 4,5 cm	16	96	6
507563	Standard : 10 x 12 cm	5,7 x 8 cm	16	256	16
507573	Post-opératoire : 6,5 x 10 cm	3 x 6,2 cm	16	192	12

**Lire attentivement la notice**

# UrgoTul Ag

## Lite Border



### DESCRIPTION

- Interface lipido-colloïde prête à poser, imprégnée de sels d'argent associée à une compresse absorbante et à un support adhésif.

**COMPOSITION :** Urgotul Ag Lite Border est un pansement absorbant imprégné de sels d'argent issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.

**Urgotul Ag Lite Border** est constitué de 3 couches :

- Une interface imprégnée de sel d'argent issue de la technologie lipidocolloïde (TLC)
- Une compresse fine disposée au centre du pansement pour absorber les exsudats et protéger la plaie,
- Un support protecteur adhésif semi-perméable en polyuréthane enduit en périphérie d'une masse adhésive de haute tolérance cutanée pour des soins simples et rapides.

**PRESENTATION :** Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

**MODE DE STERILISATION :** Radiostérilisé.

### PROPRIETES

- La spécificité de la TLC d'**Urgotul Ag Lite Border** réside dans la présence d'une matrice polymérique qui assure la cohésion des particules hydrocolloïdes et de la vaseline sur une trame polyester. Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment un film lipido-colloïdal de contact avec la plaie.
- Les sels d'Argent d'**Urgotul Ag Lite Border** libèrent progressivement les ions Argent au contact des exsudats pour une activité anti-bactérienne de contact capable de diminuer la charge bactérienne locale des plaies présentant des signes inflammatoires locaux évocateurs de colonisation bactérienne importante. L'ion Argent présente un large spectre d'action anti-microbien incluant les bactéries Gram négatif, Gram positif et certaines moisissures et levures. Il est particulièrement efficace sur les germes les plus souvent responsables de l'infection des plaies : Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus méti-R, Pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique).
- **Urgotul Ag Lite Border** a démontré une activité antibactérienne in vitro jusqu'à 7 jours.
- L'activité antibactérienne d'**Urgotul Ag Lite Border** permet en outre une réduction de l'odeur causée par certains micro-organismes présents dans la plaie.
- La compresse fine d'**Urgotul Ag Lite Border** disposée au centre du pansement absorbe les exsudats et protège la plaie.
- Le support protecteur adhésif semi-perméable en polyuréthane enduit en périphérie d'une masse adhésive de haute tolérance cutanée protège et simplifie les soins. Ainsi, **Urgotul Ag Lite Border** permet une praticité des soins et un meilleur confort pour le patient.
- La souplesse et la finesse du pansement lui confèrent une grande conformabilité adaptée aux soins des plaies de petite à moyenne surface.
- La structure aérée de la trame, ainsi que la perméabilité aux gaz de la compresse évitent les phénomènes de macération.
- Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, l'interface d'**Urgotul Ag Lite Border** n'adhère pas à la plaie : les renouvellements sont atraumatiques pour la plaie.

### INDICATIONS

- **Urgotul Ag Lite Border** est indiqué dans le traitement local des plaies faiblement exsudatives présentant un risque d'infection : plaies chroniques (ulcères, escarres), plaies aiguës (brûlures du 2<sup>e</sup> degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies chirurgicales, etc.). En raison de son caractère adhésif, Urgotul Ag Lite Border est recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lésionnelle saine.

### CONSEILS D'UTILISATION

**MODE D'EMPLOI :**

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application d'**Urgotul Ag Lite Border**.
- Bien sécher le pourtour de la plaie.
- Retirer une ailette de protection d'**Urgotul Ag Lite Border**. Appliquer la bordure adhésive à 1 cm au moins du bord de la plaie.
- Retirer la seconde ailette et appliquer **Urgotul Ag Lite Border**. Lisser doucement la bordure adhésive.
- **Urgotul Ag Lite Border** peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la taille du pansement à la plaie.
- **Urgotul Ag Lite Border** ne doit pas être plié.
- Les renouvellements d'**Urgotul Ag Lite Border** seront effectués tous les 1 à 3 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution clinique.
- **Urgotul Ag Lite Border** résiste à l'eau, et permet la douche.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

- Le traitement par **Urgotul Ag Lite Border** se fera exclusivement sous surveillance du personnel soignant.
- L'utilisation conjointe avec d'autres traitements est déconseillée.
- Les professionnels de santé doivent tenir compte du fait que les données concernant l'utilisation prolongée et répétée d'un pansement à l'argent, particulièrement chez l'enfant et le nouveau-né sont peu documentées.
- En l'absence de données cliniques spécifiques, l'utilisation d'**Urgotul Ag Lite Border** pendant la grossesse et l'allaitement ainsi que sur le nouveau-né et le prématuré est déconseillée.
- Éviter le contact du pansement avec les électrodes ou gels conducteurs pendant les mesures effectuées à l'aide d'appareils électroniques (EEG, ECG, etc...).
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Stocker **Urgotul Ag Lite Border** à l'abri de la chaleur et de la lumière, à une température inférieure à 25 °C.

**CONTRE-INDICATIONS :**

- Sensibilisation connue à l'argent et autres composants du pansement.
- Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d'examen par Résonance Magnétique Nucléaire (IRM).

### STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué Classe III (BSI).

Intégralement remboursable (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %). \*Avis HAS : ASA IV dans le traitement séquentiel de quatre semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire, ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux changements de pansement, érythème péri-lésionnel, oedème, plaie malodorante, exsudat abondant. Avis consultable sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)

# UrgoTul Ag

## Lite



Inscription à marque  
ASR IV\*



## Pansement absorbant lipido-colloïde extra mince imprégné de Sels d'Argent

### Urgotul Ag Lite

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
		Nombre UCD/Boîte	Nombre UCD	Nombre boîtes
550096	Standard : 10 x 12 cm	16	256	16
550099	Grand : 15 x 20 cm	16	224	14

Lire attentivement la notice

# UrgoTul Ag

## Lite



### DESCRIPTION

- Pansement absorbant lipido-colloïde extra-mince imprégné de Sels d'Argent.

COMPOSITION : **Urgotul Ag Lite** est un pansement absorbant imprégné de Sels d'Argent issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.

**Urgotul Ag Lite** est un pansement non adhésif, non occlusif, composé d'une trame en polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose), de vaseline et de sels d'argent, associée à une compresse protectrice et absorbante en non-tissée.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

### PROPRIETES

- La spécificité de la TLC d'**Urgotul Ag Lite** réside dans la présence d'une matrice polymérique qui assure la cohésion des particules hydrocolloïdes et de la vaseline sur une trame polyester. Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment un film lipido-colloïdal de contact avec la plaie.
- Les sels d'Argent d'**Urgotul Ag Lite** libèrent progressivement les ions Argent au contact des exsudats pour une activité anti-bactérienne de contact capable de diminuer la charge bactérienne locale des plaies présentant des signes inflammatoires locaux évocateurs de colonisation bactérienne importante. L'ion Argent présente un large spectre d'action anti-microbien incluant les bactéries Gram négatif, Gram positif et certaines moisissures et levures. Il est particulièrement efficace sur les germes les plus souvent responsables de l'infection des plaies : *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus* Méti-R, *Pseudomonas aeruginosa* (bacille pyocyanique).
- **Urgotul Ag Lite** a démontré une activité anti-bactérienne in vitro jusqu'à 7 jours.
- L'activité anti-bactérienne d'**Urgotul Ag Lite** permet en outre une réduction de l'odeur causée par certains micro-organismes présents dans la plaie.
- La compresse d'**Urgotul Ag Lite** confère au pansement une propriété protectrice et absorbante. Ainsi, **Urgotul Ag Lite** permet une facilitation des soins et un meilleur confort pour le patient car il rend inutile l'addition d'un pansement secondaire sur la plaie (compresse ou gaze stérile).
- Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, l'interface d'**Urgotul Ag Lite** n'adhère pas à la plaie : les renouvellements de pansements sont donc indolores pour le patient et atraumatiques pour la plaie.
- Grâce à sa faible épaisseur et à sa flexibilité, **Urgotul Ag Lite** est très conforme et épouse toute localisation anatomique difficile.

### INDICATIONS

- **Urgotul Ag Lite** est indiqué dans le traitement local des plaies faiblement exsudatives présentant un risque d'infection : plaies chroniques (ulcères, escarres), plaies aiguës (brûlures du 2e degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies chirurgicales, etc...). En raison de son caractère non adhésif, **Urgotul Ag Lite** est recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lésionnelle fragilisée.

### CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application d'**Urgotul Ag Lite**.
- Retirer les ailettes de protection d'**Urgotul Ag Lite**.
- Appliquer **Urgotul Ag Lite** directement sur la plaie, en posant le côté de la trame en contact avec celle-ci.
- **Urgotul Ag Lite** peut être prédécoupé si nécessaire à l'aide de ciseaux stériles, afin de l'adapter à la taille de la plaie.
- **Urgotul Ag Lite** ne doit pas être plié.
- Maintenir **Urgotul Ag Lite** avec une bande extensible ou un sparadrapp multi-extensible ou filet tubulaire.
- Poser une bande de compression si nécessaire.
- Les renouvellements d'**Urgotul Ag Lite** seront effectués tous les 1 à 3 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution clinique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Le traitement par **Urgotul Ag Lite** se fera exclusivement sous surveillance du personnel soignant.
- Il est important de poser le pansement **Urgotul Ag Lite** côté interface TLC ; vous devez donc vérifier que vous appliquez bien l'interface TLC sur la plaie et non le côté compresse.
- Ne pas plier le pansement.
- L'utilisation conjointe d'autres traitements est déconseillée.
- Les professionnels de santé doivent prendre en compte que les données concernant l'utilisation prolongée et répétée d'un pansement à l'argent, particulièrement chez l'enfant et le nouveau-né sont peu documentées.
- En l'absence de données cliniques spécifiques, l'utilisation d'**Urgotul Ag Lite** pendant la grossesse et l'allaitement ainsi que sur le nouveau-né et le prématuré est déconseillée.
- Éviter le contact du pansement avec les électrodes ou gels conducteurs pendant les mesures effectuées à l'aide d'appareils électroniques (EEG, ECG, etc...).
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Stocker **Urgotul Ag Lite** à l'abri de la chaleur et de la lumière, à une température inférieure à 25°C.

CONTRE-INDICATIONS :

- Sensibilisation connue à l'argent et autres composants du pansement.
- Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d'examen par Résonance Magnétique Nucléaire (IRM).

### STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe III (BSI).

Intégralement remboursable (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %). \*Avis HAS : ASA IV dans le traitement séquentiel de quatre semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire, ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux changements de pansement, érythème péri-lésionnel, oedème, plaie malodorante, exsudat abondant. Avis consultable sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)

**URGO**  
MEDICAL  
HEALING PEOPLE®



# UrgoTul s.Ag



## Interface lipido-colloïde imprégnée de sulfadiazine argentique


### Urgotul s.Ag

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION <i>Nombre UCD/Boîte</i>	GROUPAGE	
			<i>Nombre UCD</i>	<i>Nombre boîtes</i>
507701	Standard : 10 x 12 cm	10	160	16
507711	Grand : 15 x 20 cm	10	140	14

Lire attentivement la notice

# UrgoTul s.Ag

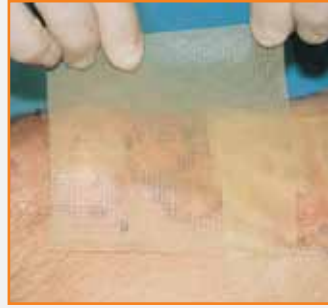

## DESCRIPTION

- Interface lipido-colloïde imprégnée de sulfadiazine argentique.

**COMPOSITION :** **Urgotul s.Ag** est un pansement hydrocolloïde non adhésif, non occlusif, non adhérent à la plaie, constitué d'une trame polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose), de vaseline et de sulfadiazine argentique.

**PRESENTATION :** Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

**MODE DE STERILISATION :** Radiostérilité.

## PROPRIETES

- Au contact des exsudats de la plaie, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et interagissent avec la composante vaselinée d'**Urgotul s.Ag** pour former une interface lipido-colloïde de contact qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel (cicatrisation en milieu humide).
- La sulfadiazine argentique présente un large spectre d'action anti-microbien incluant les bactéries gram+ et gram- et certaines moisissures et levures. Elle est particulièrement efficace sur *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus* Meti R, ainsi que sur *Pseudomonas aeruginosa* (bacille pyocyanique) qui sont les germes les plus souvent responsables de la surinfection des plaies. Le pansement a démontré une activité anti-bactérienne in vitro se poursuivant pendant 7 jours.
- Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, **Urgotul s.Ag** n'adhère ni à la plaie ni à son pourtour : les renouvellements de pansements sont indolores et atraumatiques.
- Souple et très conformable, **Urgotul s.Ag** épouse les reliefs anatomiques de la plaie.

## INDICATIONS

- **Urgotul s.Ag** est indiqué dans le traitement local des plaies à risque d'infection : plaies aiguës (brûlures du 2e degré, dermabrasions, plaies traumatiques...), plaies chroniques (ulcères, escarres).

## CONSEILS D'UTILISATION

### MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement au sérum physiologique avant l'application d'**Urgotul s.Ag**.
- Retirer les ailettes de protection du pansement.
- Appliquer directement **Urgotuls.Ag** sur la plaie.
- Recouvrir **Urgotuls.Ag** d'un pansement secondaire : compresses stériles maintenues par une bande de type Nylex ou un sparadrap de type Urgoderm.
- Les renouvellements d'**Urgotul s.Ag** seront effectués toutes les 24 à 48 h en fonction de l'évolution de la brûlure traitée.
- La durée de traitement est limitée à un mois.

### MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Le traitement par **Urgotul s.Ag** se fera exclusivement sous surveillance médicale.
- Lorsque le pansement est utilisé sur une grande surface et/ou en traitement prolongé, sur une peau lésée ou une plaie ouverte, une muqueuse, on ne peut exclure le risque d'un effet systémique lié à la sulfadiazine argentique (risque de complications générales hématologiques, rénales, intestinales et cutanées).
- peut adhérer aux gants chirurgicaux en latex. Aussi, est-il recommandé d'humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter la prise du pansement.
- L'utilisation conjointe avec d'autres traitements locaux n'est pas recommandée.
- Les professionnels de santé doivent prendre en compte que les données concernant l'utilisation prolongée et répétée d'un pansement à l'argent, particulièrement chez l'enfant et le nouveau-né sont peu documentées.
- Eviter le contact avec des électrodes ou des gels conducteurs utilisés lors d'un EEG et ECG.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Stocker **Urgotul s.Ag** à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur (température inférieure à 25°C).

### EFFETS INDESIRABLE :

- La Sulfadiazine argentique peut générer : - Erythèmes, eczéma de contact, rares cas d'argyrie - Photosensibilisation - Leucopénies parfois sévères survenant habituellement dans les premiers jours de traitement. Le passage systémique de la sulfadiazine expose au risque de complications générales des sulfamides : hématologiques, rénales, intestinales et cutanées (cf. précautions d'emploi).

### CONTRE-INDICATIONS :

- Sensibilisation connue aux sulfamides et autres composants.
- L'utilisation chez les malades insuffisants rénaux ou hépatiques, les femmes enceintes ou qui allaitent, les nouveaux-nés et les prématurés est contre-indiquée en l'absence de données cliniques spécifiques.
- Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d'un examen par Résonance Magnétique Nucléaire (IRM).

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS (Voir notice)

## STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe III (GMed).  
Non remboursé LPPR.